



Aglaja s.r.o. Branická 1814/159A, 147 00 Praha 4, tel.:+420 246 052 404, zelená linka 800 176 255

e-mail:info@aglaja.cz, www.aglaja.cz, Facebook Aglaja s.r.o.

Návod na použití a údržbu brýlových obrub

Návod na použití:

Čtěte a dodržujte následující instrukce, které pomohou udržet brýlové obruby v perfektním stavu

Popis výrobku:

- Obruby jsou dodávány s prezentačními skly. Do obrub musí být profesionálně vsazena dioptrická skla či plasty a to očním optikem za použití vhodného optického náradí.
- Nejedná se o ochranné brýle, dle směrnic 89/688/CEE
- Nejedná se o sluneční brýle, dle směrnic 89/686/CEE
- Obruby jsou určeny k běžnému použití jako je čtení, běžné pracovní aktivity, procházky, řízení vozidel, atd. kromě činností, které mohou náhodně způsobit mechanické škody, jako např. pracovní a sportovní aktivity spojené s házením či vrháním předmětů (míč, koule, kladivo, oštěp), přílišné nárazy atd., pokud není jinak označeno v N.I., které mohou způsobit nebezpečí pro nositele.

Upozornění:

- Nenechávejte brýle na odkládacích plochách, pracovních deskách, sedačkách, abyste se vyhnuli nahodilým poškozením (poškrábání, zlomení, deformace...).
- Nechoďte spát a nedívejte s brýlemi na obličej, vždy brýle ukládejte do pouzdra.
- Pokud jsou brýle zhotoveny pro vidění na blízko, nejsou vhodné k jiným účelům.
- Vyhněte se dlouhému vystavení brýlí slunečnímu záření nebo tepelným zdrojům, abyste předešli eventuálním deformacím, změnám barvy, změnám plastových složek, spálení.
- Vyhněte se nárazům (výrobce v případě zásahu airbagu ve vozidle považuje podnět za nadměrný - možnost zranění uživatele brýlí).
- Nepřibližujte kovové díly obrouček intenzivním magnetickým, elektrickým a elektromagnetickým polím, kovové díly jsou dobrými vodiči tepla a elektřiny.

- Ujistěte se o elektromagnetické kompatibilitě podle směrnic 89/336/CEE elektrických zařízeních jako akustické protézy nebo jiné přístroje.
- Vyhněte se vystavení radioaktivním zdrojů (např. rentgenové paprsky), zvláště u obrouček s kovovými díly.
- Nenechávejte obroučky v dosahu malých dětí, mohou je zdeformovat.
- Vyhněte se znečištění jakoukoli látkou, která by mohla být zdraví nebezpečná.
- Obroučky nejsou vhodné k použití v extrémních teplotních podmínkách (použití je předpokládáno v teplotním rozmezí -10 C do +50 C).
- Nepoužívejte výrobek, jsou-li na něm evidentní známky opotřebení.
- Organické detaily (dřevo, želvovina, kůže atd.) by mohly být původcem neznámých infekčních nákaz.
- Při použití řetízků nebo jiných doplňků k zavěšení brýlí na krk nebo na části oděvu je zakázáno používat stroje a přístroje v pohybu, např. fréza, soustruh atd., aby nedošlo k zachycení a následnému úrazu.

Opotřebení výrobku:

- Předmět je vystaven opotřebení způsobenému chemickými roztoky nebo produkty, kosmetikou, světelnými a tepelnými zdroji. Je vhodné dodržovat procesy čištění a zde zmíněná upozornění a vyhnout se styku se zvláště agresivními látkami.

Rady pro správné použití:

- Při nasazování a odkládání brýlí je uchopte vždy za obě stranice současně.
- Pokud se projeví změny posazení brýlí na obličeji (obruba sedne jinak, než byla převzata od optika), vraťte se k optikovi, aby brýle upravil. Toto je podstatné pro správné použití, zvláště v případech předepsání ve vývojovém věku (je nezbytný správný vývoj zrakové funkce).
- Vyvarujte se opakovaným denním gestům (posouvání brýlí do vlasů, držení obruby za jednu stranici, manipulace s koncovkami), která by mohla působit negativně na brýle.
- Používejte pouzdra odpovídajících rozměrů a taková, která chrání brýle odpovídajícím způsobem.
- Není – li možné odložit brýle do pouzdra, nepokládejte je skly na plochu. Zabraňte kontaktu s brusnými plochami.
- Nezapomínejte brýle poblíž tepelných zdrojů a nevystavujte je extrémním podmínkám prostředí, jako např. v sauně, kadeřnické helmě, vyhřátém autě vystavené slunci atd.
- Pokud se objeví alergická reakce kůže v místě kontaktu s brýlemi, předpokládá se alergie na materiál brýlí samotných. Je nutná konzultace s optikem o případné úpravě brýlí, doporučuje se vzdálení nebo izolace daného alergenu.

Udržování technického stavu:

- Pravidelně nechte kontrolovat dotažení šroubků stranic obrouček, aby nedošlo k vypadnutí skel.
- Ujistěte se o správném pohybu stranic v místě pružného uchycení (flex).
- Šroubky, sedla, koncovky nebo další součásti (nýtky, stranice) nechte v případě poškození nahradit původními náhradními díly u optika.

Čištění:

- Používejte k čištění pouze výrobky doporučené optikem a neutrální čisticí prostředky a k sušení vhodnou látku/kůži, která nezpůsobí škrábance a obroušení.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo alkohol, ani nespecifické čisticí prostředky, pokud není určeno jinak.

Ostatní nebezpečí:

- Alergické projevy způsobené materiály jako kov atd.
- Bolesti a otlaky nosu způsobené vahou obrouček .
- Výrobek, který vstoupil do styku s biologickým znečištěním může být původce nemocí.
- Poškozený výrobek může způsobit újmu uživateli (náhodné rozbití, uvolnění látek) .

Pravidelné kontroly:

- Pamatujte, že opravy a úpravy nemohou zůstat neměnné po celý život, jsou tedy nezbytné pravidelné aktualizace a nejméně pravidelné kontroly.

Raiffeisenbank a.s. Praha 1, č.ú. 715321 / 5500, IČ 25765469, DIČ CZ25765469

Zápis v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 68224